

Guía de aplicaciones de urología para VersaPulse Holmium y Doble longitud de onda, dispositivos de administración y configuración Láser

● Longitud de Onda ‡ Nd:YAG Wavelength

Aplicaciones	Dispositivos de administración				Configuración Láser			
	Linea Slim y Fibra EZ		Duotome		Nd:Yag	Holmium		
	200 ¹	365	550	1000 ²		Joules	Hertz	Watts
Uretra								
Ablación		•	•			2.0-2.4	25-30	50-72
Incisión en estenosis		•	•			1.2-1.4	14-16	17-22
Ablación del tumor/Coagulación		•	•		•	0.6-1.0	10	6-10
Vejiga								
Incisión del cuello de la vejiga(BNI)		•	•		•	1.0-2.0	10-15	10-30
Litotricia		•	•	•		0.2-2.0	5-50	1-100
Ablación del tumor / Excisión	• ‡	• ‡	• ‡	• ‡		20-35W	0.8-1.2	10-20
Ablación de tejidos blandos/Coagulación		• ‡	• ‡	• ‡	•	20-35W	1.0-1.4	10-15
Ureter								
Litotricia (Des hacer piedras)	•	•	•	•		0.2-2.0	10-50	2-100
Litotricia(Pulverizar Piedras)	•	•	•			0.2	50	10
Incisión en estenosis	•	•	•			1.0-1.2	10	10-12
Ablación del Tumor / Coagulación	• ‡	• ‡	• ‡			15W	0.6-1.2	10-16
Prostata								
Holmium Laser Ablación de la Prostata (HoLAP)					•	2.0-3.5	40-50	80-100
Holmium Laser enucleación de la Protata (HoLEP)			•			2.0-2.5	40-50	80-100
Incisión (TUIP)		•	•	•	•	2	40	80
Riñón								
Litotricia (Des hacer piedras)	•	•	•	•		0.6-2.0	6-50	3.6-100
Litotricia (Pulverizar piedras)	•	•				0.2	50	10
Otro								
Coagulación Holmium		•	•	•	•	0.6-0.8	10	6-8
Coagulación Nd:YAG		‡	‡	‡		5-10W		
Hemostasia	• ‡	• ‡	• ‡	• ‡	• ‡	5-10W	1.5	40

Notas: Los ajustes del láser son sólo directrices. Comience siempre a un nivel moderado e ir aumentando para lograr el efecto deseado en el tejido

¹ Por favor tenga en cuenta las limitaciones de potencia de las fibras 200 um Linea Slim y EZ como se define en las Instrucciones de uso

² 1000um es solo aplicable para Linea Slim de la familia de fibras reusables.

©2013, the Lumenis Group of Companies. All rights reserved. Lumenis, its logo, VersaPulse, PowerSuite, SlimLine and DuoTome are trademarks or registered trademarks of the Lumenis Group of Companies. Specifications are subject to change without notice.
PB-1000989 Rev. A.